

# ILAST® HYDRACLEAN

Zur Reinigung erkrankter Augenlider.

Gel mit 0,2% Hyaluronsäure (Natriumhyaluronat).  
Ophthalmologisch getestet.

0% Konservierungsmittel. 0% Paraben. 0% Parfüm. 0% Alkohol. 0% Lanolin.  
Die EpiFree Technology™ ist ein exklusiver, patentierter Herstellungsvorgang.  
Er gewährleistet die Integrität der Inhaltsstoffe ohne jedes Konservierungsmittel.

## **Darreichungsform:**

50ml Flasche mit Airless-Pumpe.

## **Zusammensetzung:**

0,2% Natriumhyaluronat, Allantoin, Polysorbat 20.

Weitere Inhaltsstoffe: Wasser (Aqua), Glycerin, Hydroxyethylacrylat/Natrium  
Acryloyldimethyl taurat copolymer, Zitronensäure.

## **Wozu verwendet man ILAST® HYDRACLEAN?**

Gel zur Reinigung erkrankter Augenlider, besonders des Lidrandes, bei allen Arten von Blepharitis: seborrhoische Dermatitis, Meibomitis etc. ILAST® HYDRACLEAN ermöglicht das mechanische Entfernen von Schuppen, seborrhoischen Ablagerungen, Sekreten und Krusten auf den Augenlidern und an Wimpernansätzen. Die Kombination von Natriumhyaluronat und Allantoin trägt zur Bewahrung der Feuchtigkeit bei und fördert die Hautheilung.

## **Wie wird ILAST® HYDRACLEAN verwendet?**

- Drehen Sie den Flaschenkopf gegen den Uhrzeigersinn (siehe Pfeil auf der Pumpe), indem Sie den Flaschenkörper mit der anderen Hand festhalten. So wird die Pumpe entriegelt.
- Beim ersten Gebrauch mehrmals auf den Flaschenkopf drücken, um die Pumpe vorzubereiten.
- Tränken Sie eine Kompresse mit ILAST® HYDRACLEAN. Legen Sie die Kompresse bei geschlossenem Auge sanft auf das Augenlid und die Wimpernwurzel auf.
- Massieren Sie das Augenlid sanft mit Kreisbewegungen.
- Wiederholen Sie diese Schritte auf dem anderen Auge mit einer neuen Kompresse.
- Verriegeln Sie die Pumpe nach Gebrauch, indem Sie den Flaschenkopf im Uhrzeigersinn drehen.
- Sollte die Pumpe während des Gebrauchs ausfallen, mehrmals auf den Flaschenkopf drücken, um sie wieder zu aktivieren.
- Nach Gebrauch nicht abwaschen.
- Anwendung auf der Haut.

## **Vorsichtshinweise:**

- o Nicht einnehmen.
- o Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- o Nach dem Verfallsdatum auf der Flasche nicht mehr verwenden.
- o Flasche nicht öffnen (Gefahr einer Kontamination durch Bakterien)
- o Nicht verwenden bei Beschädigungen: beschädigte Flasche, abgebrochene Pumpe, .... (Gefahr einer Kontamination durch Bakterien)
- o Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verwenden.
- o Bei Temperaturen zwischen 2°C und 35°C aufbewahren.

**Kontraindikationen:**

Hypersensibilität gegen einen der Inhaltsstoffe.

**Was ist die EpiFree Technology™ ?**

Die EpiFree Technology™ wurde von den HORUS PHARMA Labors entwickelt. Es handelt sich um einen exklusiven, patentierten Herstellungsvorgang, der ohne jedes Konservierungsmittel die Integrität der Wirkstoffe gewährleistet. So nehmen weder die Hyaluronsäure, die empfindlich ist gegen die herkömmlichen Dekontaminations-Vorgänge, noch die anderen Wirkstoffe Schaden. Die Augenlider sind ein besonders empfindlicher, verletzlicher Bereich unseres Körpers. Aufgrund der unmittelbaren Nähe der Augen sind die üblichen Hautbehandlungen ungeeignet. Dank der Vorteile der EpiFree Technology™ eignet sich die neueste Generation der Produktreihe ILAST® besonders gut für die Hygiene und Pflege von ultrasensibler, allergischer und erkrankter Haut.

CE 1014

Dieses Medizinprodukt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Datum der Kennzeichnung; (01/2008; Rev. 2012)